


geneo X




STEP 1

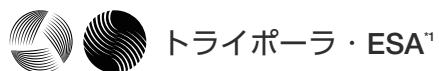


トライポーラ・ESA¹⁾

STEP 2

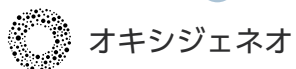

オキシジェネオ

STEP 3

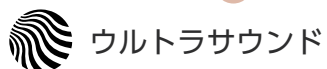

ウルトラサウンド

4-IN-1 EFFECT

トライポーラ・
ESA¹⁾
引き締め

オキシジェネオ
角質除去²⁾

オキシジェネオ
酸素充足

ウルトラサウンド
美容液浸透³⁾

¹⁾ Electrical Skin Activation ²⁾ 古い角層を削り落とす ³⁾ 角質層まで

Q&A

Q 何回の施術で効果が分かりますか？

A 1回目施術の直後から、効果が期待できます。
ベストな状態を手に入れるために
継続した使用をお勧めします。

Q ダウンタイムはありますか？

A ありません。
すぐにスキンケアやお化粧が可能です。

Q 施術時間はどれぐらいですか？

A 平均的に30分程度です。
ジェネオ エックスは施術メニューと組み合わせる
ことができます。
その場合の施術時間は施設により異なります。

Q 施術後に気をつけることは？

A 日焼け止めをしっかりと塗ってください。
美容成分が浸透しやすい肌の状態ですので、
ホームケア製品も積極的にご使用ください。

LUMENIS

美容施術を受けられるみなさまへ

geneo X
ジェネオ エックス

4-IN-1 SUPER FACIAL
そして私が輝きだす

3つのステップで
4つのトリートメントが可能
美容機器「ジェネオ エックス」



自然成分へのこだわり

パラベンフリー 動物実験フリー 動物成分フリー
防腐剤フリー 香料フリー 着色料フリー

WHAT IS geneo x THE 4-IN-1 SUPER FACIAL?

ジェネオ エックスは、1台で
4つのトリートメントが行え、
フレッシュな見た目に導く美容機器です。

アメリカ、カナダを中心に
全世界60カ国以上、
10,000台以上*導入され、
いつまでも輝きたいと願う
多くの方々をサポートしています。



STEP 1 引き締め(タイトニング)

独自のトライポーラテクノロジーにより、ターゲットとなる部位に効率よくエネルギーを与え、温熱作用をもたらします。同時に、人体の生体電位に近い低周波(0.78~3.12Hz) 刺激を皮膚表層²に与え、電荷の負荷により肌を引き締めます。



STEP 2 角質除去¹・酸素充足

一度で ①角質の除去¹、②酸素充足²、③整肌・保湿成分の浸透²促進 の3つのアプローチにより肌本来の自然なサイクルを整えます。



角質除去¹

アプリーケーター先端のオキシボッドとジェルの化学反応により表面にざらつき生まれ、古くなった角質を優しく除去します。



酸素充足

CO₂の発生によりお肌の調子を整えます。

保湿成分導入

酸素が充足した肌にオキシボットの成分が浸透します。



STEP 3 美容液の浸透²

毎秒100万回振動する超音波技術により角質層への透過を高め、美容液を浸透させます。



使用する美容成分は
お肌の悩みに合わせて
選択できます

